

# TECHNICKÝ LIST

pro produkt: Zásobník náplastí a péče o rány Cederroth - CD 51011006



## VLASTNOSTI:

Pro počet lidí:	40
Typ provedení:	nástěnná
Výplach očí:	NE
Šířka:	30,6 cm
Výška:	15,5 cm
Délka:	20,3 cm
Materiál:	ABS plast / polykarbonát
Hmotnost:	1,3 kg
Barva:	zelená
Expirace:	5 let

## POPIS VÝROBKU:

Zásobník náplastí a péče o rány Cederroth obsahuje produkty určené na ošetření drobných ran. Všechny **náplasti jsou snadno dostupné** a chráněné proti prachu a vlhkosti průhledným víkem. Náhradní náplně se vyměňují pomocí speciálního klíče. Zásobník náplastí obsahuje náplasti různých velikostí a také měkkou pěnovou samoadhezivní voděodolnou bandáž, kterou můžete odříznout **podle potřeby** přímo v zásobníku. Zásobník náplastí obsahuje zdravotnické prostředky s označením CE.

## VÝHODY:

- výrobek splňuje **nejvyšší světové standardy** a má označení CE,
- součást velmi jednoduchého a komplexního systému Cederroth,

- Cederroth odpovídá normám pro metodu **organizace 5S**,
- Cederroth je **držitel ocenění** za produktový a komunikační design **reddot**.
- Od roku 2022 je zeleně zbarvený plast v této stanici vyroben z více než 85 % z recyklovaného plastu.

## POUŽITÍ:

Zásobník náplastí a péče o rány Cederroth je **malá stanice první pomoci** užitečná při ošetření menších poraněních. Stanice je ideální jako **lékárnička do kanceláře nebo jiného provozu**, kde jde často právě jen o malá poranění. Čisticími ubrousky, které jsou jednotlivě balené, si nejdřív ránu očistíte. Poté vyberete vhodný typ náplastí. Pěnová **samoadhezivní bandáž** je vhodná pro případy, pokud často přijdete do styku s vodou. Ostatní náplastí - textilní náplast, plastovou náplast nebo extra velkou náplast - vyberete podle velikosti rány a vašich potřeb. Náplastí jsou po vyjmutí ihned k nalepení, což mimo jiné brání odcizení. Náplň s náplastmi vyměníte pomocí speciálního červeného klíče snadno a rychle.

## SLOŽENÍ LÉKÁRNIČKY:

- 1x Čisticí ubrousky na poranění Salvequick (x40) (CD 3227)
- 1x Pěnová bandáž Salvequick (CD 51011010)
- 1x Náplastí textilní Salvequick (x40) (CD 6444)
- 1x Náplastí plastové voděodolné Salvequick (x45) (CD 6036)
- 1x Náplastí textilní extra velké Salvequick (x21) (CD 6470)
- 1x Klíč pro doplňování náplní

## DOPORUČENÍ:

**Cederroth – první pomoc na nejvyšší úrovni - modulární systém**

**Jeden systém.  
Neomezené doplnění.**



**NÁVOD K POUŽITÍ:**

**Náplasti Salvequick**

- Vytáhněte náplast ze zásobníku,
- nalepte u ranky,
- polštářek dejte na ranku,
- sundejte krytí druhé půlky náplasti,
- nalepte druhou půlku náplasti.

Pokud potřebujete v zásobníku vyměnit náplň za novou, stačí vložit klíč do otvorů nad náplní, vyjmout starou náplň a vložit novou.

**Pěnová bandáž Salvequick**

1. Integrovaným řezákem odříznete potřebný kus bandáže.
2. Bandáž přilne pouze sama k sobě.
3. Obalte s ní tedy ránu tak, aby na ruce nebo jiné končetině dobře držela.

**BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE:**



Prevence rizik na pracovišti začíná správnou organizací práce a dodržováním bezpečnostních pravidel. Pravidelné kontroly, školení a používání ochranných pomůcek snižují riziko úrazů a zdravotních komplikací. Zaměstnanci by měli aktivně přispívat k bezpečnému pracovnímu prostředí a včas hlásit nebezpečné situace. Produkty mějte na bezpečném místě a neposkytujte je dětem do 3 let bez vašeho dozoru.

**VÝROBCE:**

Orkla Wound Care AB, Box 1336 (Svetsarvägen 15), Solna, Sweden, [www.cederroth.com](http://www.cederroth.com),  
[Regulatory\\_OWC@orkla.com](mailto:Regulatory_OWC@orkla.com)

V Praze dne 2. 4. 2026