

TECHNICKÝ LIST

pro produkt: Zásobník s náplastmi Salvequick - CD 490700



VLASTNOSTI:

Pro počet lidí:	20
Typ provedení:	nástěnná
Výplach očí:	NE
Šířka:	22,6 cm
Výška:	11,4 cm
Délka:	5,4 cm
Materiál:	ABS plast
Barva:	zelená
Expirace:	5 let

POPIS VÝROBKU:

Zásobník s náplastmi Salvequick **chrání náplasti** před prachem, špínou a vlhkostí až do doby použití. Uvnitř zásobníku jsou náplasti textilní Salvequick a náplasti plastové voděodolné Salvequick. Zdravotnické prostředky uvnitř zásobníku náplastí jsou označeny značkou CE.

POUŽITÍ:

Zásobník s náplastmi Salvequick funguje tak, že náplast, lze **snadno vytáhnout ze zásobníku a aplikovat** na ránu pouze **jednou rukou**. Náplně jsou v zásobníku zaaretovány a pro jejich vyjmutí je nutné použít červený klíč dodávaný s výrobkem. To funguje jako účinný **prostředek proti krádeži**. Zásobník je ideální jako lékárnička do kanceláře, protože zranění v kanceláři většinou nejsou vážná a dají se převážně vyřešit jen náplastí. Náplň s náplastmi vyměníte pomocí speciálního červeného klíče snadno a rychle.

DOPORUČENÍ:

Cederroth – první pomoc na nejvyšší úrovni - modulární systém

**Jeden systém.
Neomezené doplnění.**



OBSAH BALENÍ:

- 1x zásobník náplastí Salvequick
- 1x náplasti textilní Salvequick (CD 6444)
- 1x náplasti plastové voděodolné Salvequick (CD 6036)

NÁVOD K POUŽITÍ:

- Vytáhněte náplast ze zásobníku,
- nalepte u ranky,
- polštářek dejte na ranku,
- sundejte krytí druhé půlky náplasti,
- nalepte druhou půlku náplasti.

Pokud potřebujete v zásobníku vyměnit náplň za novou, stačí vložit klíč do otvorů nad náplní, vyjmout starou

náplň a vložit novou.

BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE:

Prevence rizik na pracovišti začíná správnou organizací práce a dodržováním bezpečnostních pravidel. Pravidelné kontroly, školení a používání ochranných pomůcek snižují riziko úrazů a zdravotních komplikací. Zaměstnanci by měli aktivně přispívat k bezpečnému pracovnímu prostředí a včas hlásit nebezpečné situace. Produkty mějte na bezpečném místě a neposkytujte je dětem do 3 let bez vašeho dozoru.

VÝROBCE:

Orkla Wound Care AB, Box 1336 (Svetsarvägen 15), Solna, Sweden, www.cederroth.com,
Regulatory_OWC@orkla.com

V Praze dne 2. 4. 2026