


TECHNICKÝ LIST

pro produkt: Obvaz k zastavení krvácení 4 v 1 Cederroth - CD 1910

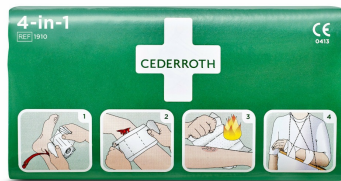

VLASTNOSTI:

Materiál: viskóza / polyetylen
Barva: bílá
Expirace: 5 let

POPIS VÝROBKU:

Obvaz k zastavení krvácení 4 v 1 Cederroth je sterilní univerzální obvaz, který se skládá ze dvou elastických ob vazů a jednoho obkladu s nepřilnavou vrstvou. Obklad je přišit k jednomu z ob vazů. Obvaz je zabalen do sáčku s tištěnými obrazovými **pokyny první pomoci**. Obvaz má rozměry 10 x 300 cm a obklad 23 x 14 cm. Obvaz k zastavení krvácení 4 v 1 Cederroth má označení CE.

VÝHODY:

- výrobek splňuje **nejvyšší světové standardy** a má označení CE,
- součást velmi jednoduchého a komplexního systému Cederroth,
- Cederroth odpovídá normám pro metodu **organizace 5S**,
- Cederroth je **držitel ocenění** za produktový a komunikační design **reddot**.
- Od roku 2022 je zeleně zbarvený plast v této stanici vyroben z více než 85 % z recyklovaného plastu.

POUŽITÍ:

Obvaz k zastavení krvácení 4 v 1 Cederroth je určen pro první pomoc. Obvaz má **čtyři funkce**, a tak nahrazuje řadu tradičních ob vazů a ob vazů první pomoci:



1. Tlakový obvaz pro silné krvácení
2. Ochranný obvaz pro povrchové rány
3. Obvaz na popáleniny se speciální nepřilnavou vrstvou
4. Dočasný podpůrný obvaz

Obvaz je k jednorázovému použití.

DOPORUČENÍ:

Cederroth – první pomoc na nejvyšší úrovni - modulární systém



NÁVOD K POUŽITÍ:

1. **Popálenina** – popáleninu zchlaďte pod tekoucí vodou 20-28°C, poté rozevřete obvaz 4 v 1 a nepřilnavou vrstvou obvazu přiložte na popáleninu a zavažte.
2. **Silné krvácení** – rozevřete obvaz 4 v 1 a s vloženým obvazem ponechaným na svém místě přiložte na ránu a velice pevně zavažte.
3. **Rány bez silného krvácení** – rozevřete obvaz 4 v 1, vyjměte obvaz umístěný uvnitř, nepřilnavou vrstvou obvazu přiložte na ránu a zavažte.

4. **Zlomeniny** – rozevřete obvaz 4 v 1, vyjměte obvaz umístěný uvnitř, ke zranění přiložte podpěru a obvažte obvazem 4 v 1.

BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE:

Prevence rizik na pracovišti začíná správnou organizací práce a dodržováním bezpečnostních pravidel. Pravidelné kontroly, školení a používání ochranných pomůcek snižují riziko úrazů a zdravotních komplikací. Zaměstnanci by měli aktivně přispívat k bezpečnému pracovnímu prostředí a včas hlásit nebezpečné situace. Produkty mějte na bezpečném místě a neposkytujte je dětem do 3 let bez vašeho dozoru.

VÝROBCE:

Orkla Wound Care AB, Box 1336 (Svetsarvägen 15), Solna, Sweden, www.cederroth.com,
Regulatory_OWC@orkla.com

V Praze dne 2. 4. 2026